



ASSUT EUROPE
SUTURE CHIRURGICHE



More than surgery

Covid-19

TEST RAPIDO **SALIVARE**
ANTIGENE



SEMPLICE E PRECISO

Facile campionamento
della saliva




EFFICIENTE

Il risultato è disponibile
in 15 minuti




SICURO

Nessun contatto con
il sangue

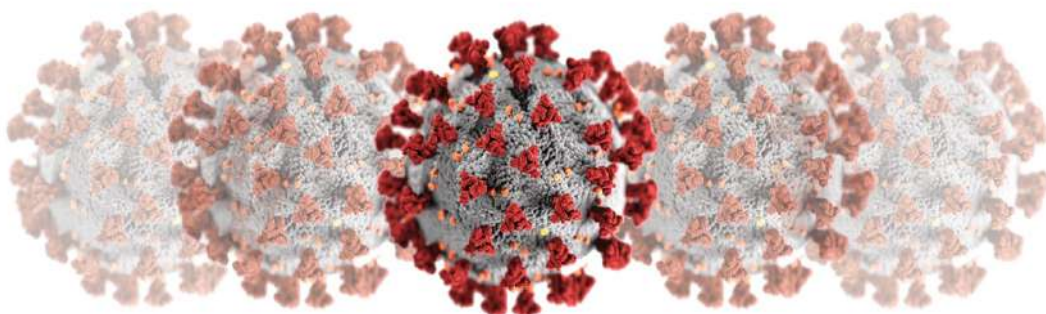


Covid-19

TEST RAPIDO SALIVARE ANTIGENE

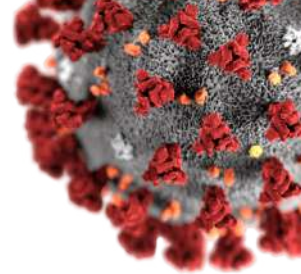

“Spike Glioprotein Detection Kit” è un kit cromatografico che rileva in qualità e quantità i nuovi coronavirus in campioni di saliva.

Fornisce un aiuto nella diagnosi dell'infezione da SARS-COV-2.

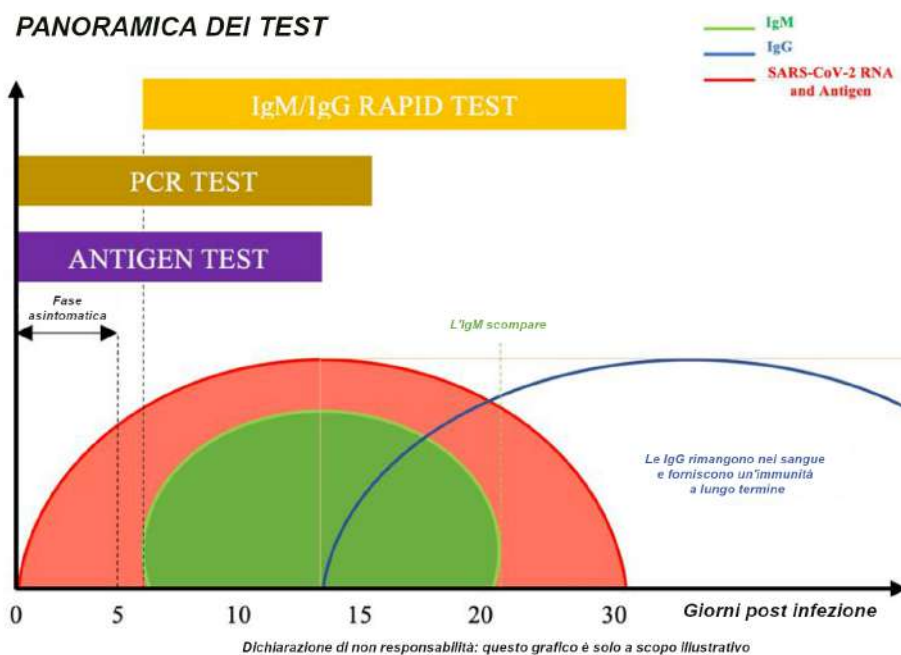

TEST RAPIDI IgM/IgG

- + I test degli anticorpi possono essere utili per controllare la formazione di anticorpi e condurre un'indagine epidemiologica del paziente corrispondente
- Impossibile da diagnosticare nella fase iniziale

TEST DELL'ANTIGENE


- + Procedura di test semplice, processo decisionale più rapido per un isolamento grazie al risultato rapido. Nessun contatto con il sangue.
- Meno sensibilità rispetto alla PCR

PCR TEST

- + Metodo di test più sensibile per la diagnosi
- Tempo di esecuzione lungo. Ad esclusivo uso professionale, necessità di apparecchiature specializzate per leggere i risultati.

Covid-19


TEST RAPIDO **SALIVARE** ANTIGENE

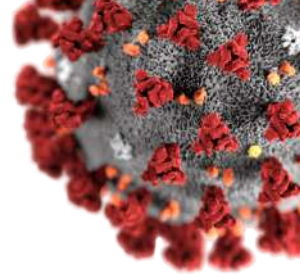


La **SALIVA** è un'opzione interessante per rilevare la SARS-CoV-2, rispetto agli attuali test che prevedono il prelievo di tamponi di muco dal tratto respiratorio superiore.

La saliva è facile da raccogliere, il che rende i test più economici e meno invasivi.


Istruzioni per l'uso: Uso corretto, comodo e veloce

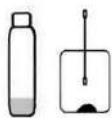

1. Inserire il campione di saliva nel sacchetto

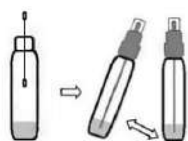

2. Svitare la provetta, utilizzare l'asta di campionamento o un batuffolo di cotone per raccogliere 10-50 mg di campioni di saliva freschi. Posizionare i campioni all'interno della provetta, agitare e mescolare.

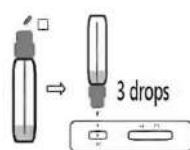

3. Prendere il kit dalla confezione, posizionarlo su un tavolo, tagliare la sporgenza della provetta di raccolta e aggiungere 3 gocce del campione nel pozzetto S in posizione verticale.



4. Attendere la comparsa della striscia rossa sulla linea T, leggere il risultato entro 15 minuti. Test non valido dopo 20 minuti.

Interpretazione dei risultati

5. Alla fine del test, l'intensità della linea T è proporzionale alla concentrazione del nuovo coronavirus nel campione, mentre l'intensità della linea di controllo C è irrilevante per la quantità di coronavirus nel campione




POSITIVO (+): Entrambe le linee T e C vengono visualizzate in 3-15 minuti.


NEGATIVO (-): La linea C viene visualizzata mentre non è comparsa alcuna linea T entro 15 minuti dall'aggiunta del campione.

NON VALIDO: Finché la linea C non viene visualizzata, indica che il risultato del test non è valido e deve essere ripetuto con un altro kit.


6. Il kit usato deve essere smaltito come materiale di scarto ospedaliero

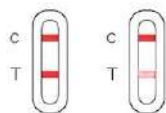

Risultato Positivo

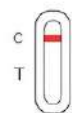

Risultato Negativo

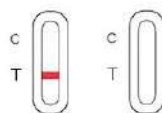

Risultato Non Valido



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
COVID-19/AG	KIT - Test rapido salivare	25 unità
5230/26	EC STER SPRAY	10 flaconi monodose
5230/15	EC STER SPRAY	15 flaconi monodose



ASSUT EUROPE
SUTURE CHIRURGICHE



More than surgery



ITALIA

Stabilimento di Produzione

Zona Industriale
67062 Magliano dei Marsi (AQ), Italy
Tel. +39 0863 517956/515000
Fax +39 0863 570084/515209

Ufficio Legale

Via G. Gregoraci, n.12
00173 Roma
Tel. +39 06 72677348
Fax +39 06 72675380

FRANCE

86-114 Avenue Louis Roche
Batiment D Hall-3 92230
Gennevilliers
Tel. +33 147985294
Fax +33 147985892

ESPAÑA

Poligono Landaben
Calle C, nave 1y2 - 31012
Pamplona (Navarra)
Tel. +34 948122274
Fax. +34 948120842

GERMANY

Prager Strasse 34
04317 Leipzig

UK

Unit 12a Barncliffe Mills
Shelley HD8 8LU Huddersfield
Tel. +44 1484602222

USA

55 NE 5th Avenue, Suite 501
33432 - 4093 Boca Raton FL
United States

RUSSIAN FEDERATION

c/o Studio Marzona
Rozhdestvenskiy B-r 10 Bld. 7
107031 Moscow
Tel/Fax +7 962 9862804

BRASIL

Rua Professor Alfredo Gomes, 14
CEP 22551-080
Botafogo Rio De Janeiro (RJ)
Tel.: 0055 21 22661943
Fax: 0055 21 22663539

ALGERIE

Zone D'Activité Dar El Beida
Lot n° 66, Bt 12
Alger

TUNISIE

Rue 7316 Villa n°5 - El Menzah 9B
1013 Tunis, Tunisie
Tel.: 00216 71875740
Fax: 00216 71880541

www.assuteurope.com
info@assuteurope.com



©2020 Assut Europe S.p.A. All rights reserved
CE 0373 - UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 13485:2016
UNI EN ISO 14001:2015