



ASSUT EUROPE
SUTURE CHIRURGICHE



More than surgery




COVID-19

TEST RAPIDO ANTIGENE
TAMPONE NASO FARINGEO

SEMPLICE

RAPIDO

PRECISO

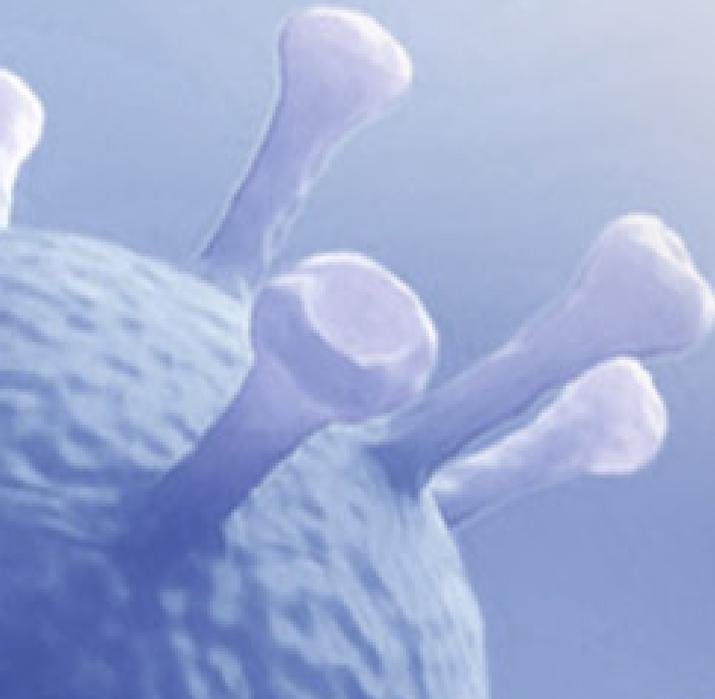

“SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit” è un kit di test immunocromatografico per il rilevamento qualitativo dell’antigene della proteina nucleocapsidica del SARS-CoV-2 in campioni di tampone nasofaringeo (NP) .

Fornisce un aiuto nella diagnosi di infezione da SARS-COV-2. Il nuovo kit non distingue SARSCoV e SARS-CoV-2.


RACCOLTA DEL CAMPIONE




Utilizzare il batuffolo di cotone fornito nel kit

1. Inserire con attenzione il batuffolo nella narice del paziente, raggiungendo la superficie posteriore nasofaringea.
2. Tamponare la superficie posteriore nasofaringea. Ruotare il batuffolo più volte

PREPARAZIONE DEL CAMPIONE

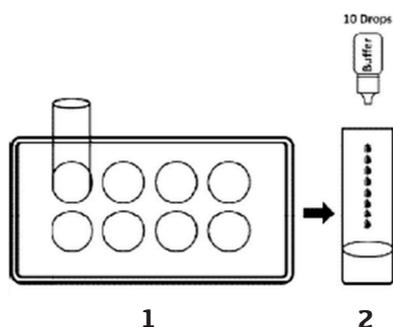


1. Inserire la provetta monouso nella stazione di lavoro. Bisogna essere sicuri che la provetta sia ferma e che raggiunga la parte inferiore della stazione di lavoro
2. Aggiungere 0,3mL (circa 10 gocce) del buffer nella provetta

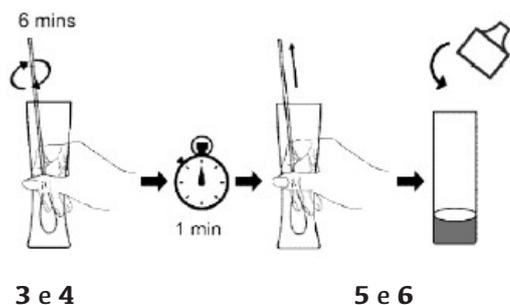

3. Inserire il batuffolo nella provetta (che contiene 0.3mL di buffer)
4. Ruotare il batuffolo almeno 6 volte mentre si preme la testa del batuffolo contro la parte inferiore e laterale della provetta
5. Lasciare il batuffolo nella provetta per 1 minuto
6. Schiacciare il tubo diverse volte con le dita dall’esterno per immergere il batuffolo. Togliere il batuffolo. La soluzione estratta verrà utilizzata come campione per il test.

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

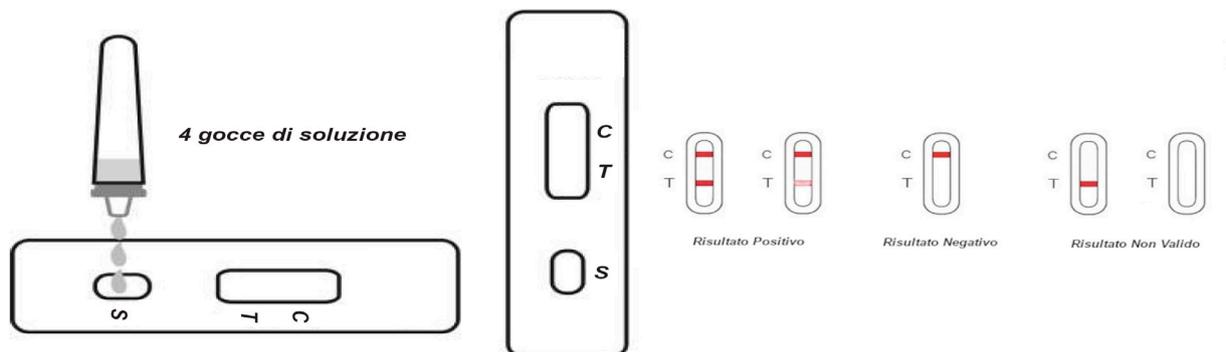

Positivo (+): Entrambe le linee T e C vengono visualizzate entro 15 minuti dall'aggiunta del campione.

Negativo (-): Appare una linea C mentre nessuna linea T appare dopo 15 minuti dall'aggiunta del campione.

Non valido: Fino a quando la linea C non viene visualizzata, indica che il risultato del test non è valido e bisogna ripetere il test con un'altra cassetta di test.

Attendere la comparsa della striscia (o delle strisce) colorata.

Leggere il risultato in 15 minuti. Non leggere il risultato dopo 20 minuti.

COMPONENTI DEL KIT

- 1 Cassetta di Test monouso
- 1 Provetta monouso per l'estrazione del campione e tappo contagocce
- 1 Batuffolo di cotone monouso
- 1 Buffer monouso

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
COVID-19-AGA	Kit di rilevazione Antigene SARS-COV-2	BOX da 20 / 25



More than surgery

ITALIA

Stabilimento di Produzione

Zona Industriale
67062 Magliano dei Marsi (AQ), Italy
Tel. +39 0863 517956/515000
Fax +39 0863 570084/515209

Ufficio Legale

Via G. Gregoraci, n.12
00173 Roma
Tel. +39 06 72677348
Fax +39 06 72675380

FRANCE

86-114 Avenue Louis Roche
Batiment D Hall-3 92230
Gennevilliers
Tel. +33 147985294
Fax +33 147985892

ESPAÑA

Poligono Landaben
Calle C, nave 1y2 - 31012
Pamplona (Navarra)
Tel. +34 948122274
Fax. +34 948120842

GERMANY

Prager Strasse 34
04317 Leipzig

UK

Unit 12a Barncliffe Mills
Shelley HD8 8LU Huddersfield
Tel. +44 1484602222



USA

55 NE 5th Avenue, Suite 501
33432 - 4093 Boca Raton FL
United States

RUSSIAN FEDERATION

c/o Studio Marzona
Rozhdestvenskiy B-r 10 Bld. 7
107031 Moscow
Tel/Fax +7 962 9862804

BRASIL

Rua Professor Alfredo Gomes, 14
CEP 22551-080
Botafogo Rio De Janeiro (RJ)
Tel.: 0055 21 22661943
Fax: 0055 21 22663539

ALGERIE

Zone D'Activité Dar El Beida
Lot n° 66, Bt 12
Alger

TUNISIE

Rue 7316 Villa n°5 - El Menzah 9B
1013 Tunis, Tunisie
Tel.: 00216 71875740
Fax: 00216 71880541

www.assuteurope.com
info@assuteurope.com

